

Monterings- & brugervejledning



Læs denne vejledning grundigt
før de tager rollatoren i brug



P. Andersen & Son A/S
HJÆLPEMIDLER

BS-120
TYPE 146

Tak fordi de valgte BS120 rollatoren

Inden rollatoren kan tages i brug bedes de kontrollere indholdet i pakken, som består af følgende:

- BS120 Rollator type 146
- Pose med skruer for justering af styr.
- Kurv for rollator.


For rollatorer med luftgummihjul, skal lufttrykket tjekkes i alle hjulene, (36psi).

Montering af styr:



Styrene sættes på plads i rollatorstellet, i henholdsvis højre og venstre side.

NB! Dette kan kun gøres mens at rollatoren er sammenslået, ellers er kablerne for korte.

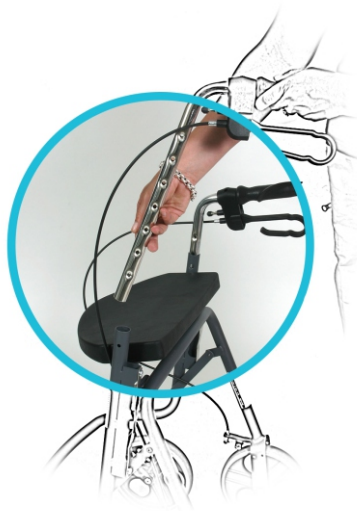

Herefter kan rollatoren slås ud. (se afsnittet "**Rollator åbnes og klappes sammen**").

Og styrene justeres til den ønskede højde

Montering af kurv:




Kurven monteres foran på rollatoren, ved at de 2 kroge sættes ind over tværrøret, under sædet, hvor den automatisk vil hvile på stellet.



Kurven må højst belastes med 10 kg

Montering af bakke:

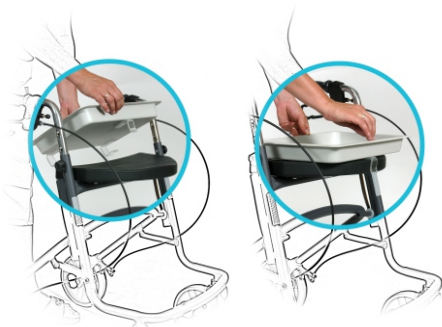

Bakken monteres, ved at presse de 2 clips ind under sædet, og derefter trykke den forreste clips ned over forkanten af sædet.




Bakken må højst belastes med 4 kg

Tilbehør




A

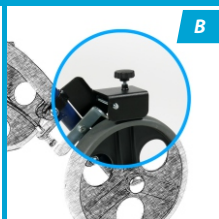


B



C

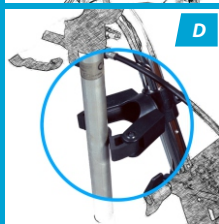

D

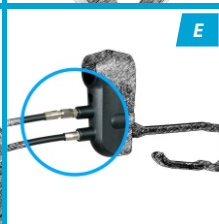

E

Ekstra tilbehør til din rollator

- A: Tværgreb**
- B: Slæbebremse**
- C: Rygbånd**
- D: Stokkeholder**
- E: Enhåndsbremse**

Justering af styrhøjde:

1



Den ønskede højde justeres ved hjælp af dreje stilleskruen på siden af stellet af, herefter kan den gennemgående bolt trykkes ud, og styret kan justeres i den ønskede højde.

Følgende højder kan vælges:


Model L	Model H
78 cm.	88 cm.
82 cm.	92 cm.
86 cm.	96 cm.
90 cm.	100 cm.
94 cm.	104 cm.

2



Efter bolten er presset på plads igen, er det yderst vigtigt at boltehovedet er rigtigt på plads i det 6 kant hul der er i stellet.

3

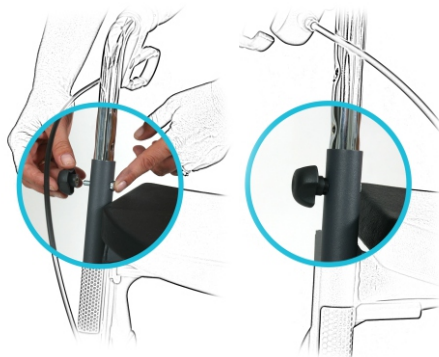

Stilleskrue drejes på gevindet, og spændes til.



Brug aldrig værktøj til at spænde håndgrebet, da de kan risikere at deformere røret, og dermed beskadige det.

Bremsefunktion:



Normal bremsefunktion opnås, ved at trække bremsehåndtaget op mod styret, i henholdsvis højre og venstre side.

Blokering af bremse:



Ønskes blokering af bremse, f.eks. ved hvile, presses bremse-håndtaget helt ned, hvorved håndtaget automatisk fastlåses i denne position.

Bremse udløses igen, ved at trække bremsehåndtaget opad igen.

Justering af bremse:



Justering af bremse, sker ved at dreje på stilleskruen, som sidder forrest på bremsehuset.

Spænding af bremse, drej venstre om.

Løsere bremse, drej højre om.

Rollator åbnes, og klappes sammen:

1




Rollatoren åbnes, ved at de trykker så hårdt på bremse-håndtagene, at hjulene er blokeret, samtidig med at de skubber rollatoren let fremover, så denne foldes ud.

2



Når rollatoren er foldet ud, skal man sikre sig at stellet er låst. Dette gøres ved at trykke let på tværstangen under sædet, til der høres et "klik".

3

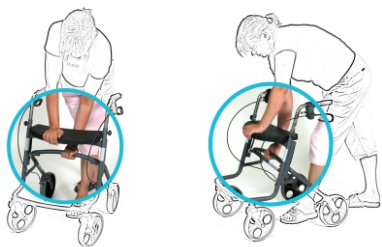

Ved sammenklapning lægger man den ene hånd på sædet, og placerer den anden hånd på tværstangen under sædet, og trækker opad, indtil låsen går ud af indgreb.


4



Rollatoren kan nu klappes sammen.



Korrekt betjening ved udfoldning af rollator.

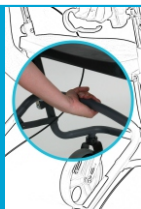

Korrekt betjening ved sammenklapning af rollator.



Ved betjening af sammenklapningsmekanismen, er det vigtigt, at de holder hænderne som beskrevet fig. 3 og fig. 4, for at undgå klemningsrisiko.

Rengøring og vedligeholdelse.

Rollatoren kan rengøres med almindelige husholdnings rengøringsmidler.

Fastsiddende snavs kan fjernes med rensbenzin.

Rollatoren bør mindst en gang om året, have efterspændt hjulene, samt smørres på bremsekablerne.

Glideskinner i sammenklapningsmekanismen smørres med vaseline, ell. lign.

For rollatorer med luftgummihjul, er det normale tryk i hjulet 36 PSI

Rollatoren er CE mærket. (Velegnet til både inden- og udendørs brug)

Ny forbedret bremse, der opfylder kravene i henhold til

EN ISO/DIS 11199-2

HMI Nr. 32064 (Massive hjul)

HMI Nr. 52256 (Lufthjul)

Specifikationer:

Bredde total:	60 cm.
Længde udfoldet:	80 cm.
Længde sammenklappet:	43 cm.
Håndtagshøjde min/max:	78-94 cm. (<i>Model L</i>)
Håndtagshøjde min/max:	88-104 cm. (<i>Model H</i>)
Sædehøjde:	64 cm.
Max. brugervægt:	125 kg.
Max. belastning i kurv:	10 kg.
Max. belastning i bakke:	5 kg.
Vægt. uden tilbehør:	11,5 kg.

Reservedelsliste:

Bremsekabel:	141-133-11
Bremsehåndtag:	141-133-10
Fjeder for bremse:	141-133-22
Tværbolt for styr, m/spændegreb. sæt:	141-148-10
Gummihåndtag, Anatomisk, sæt:	141-133-18
Gummihåndtag, runde, sæt:	141-133-19
Sæde, formstøbt, m/indlæg.	141-133-38
Hjul, pur, ø300x35, m/lejer:	141-141-102
Hjul, Luftgummi, ø300x50, m/lejer.	141-141-103
Hjulgaffel, for, med kuglelejer.	141-133-21



Forhandler